



ASSUT EUROPE

SUTURE CHIRURGICHE



More than surgery

Covid-19

TEST RÁPIDO IgG/IgM



EXACTA

Anticuerpo de alta pureza
con alta precisión




EFICAZ

Resultado de la prueba
disponible en 15 minutos




ACESIBLE

Apta para sangre
de dedos

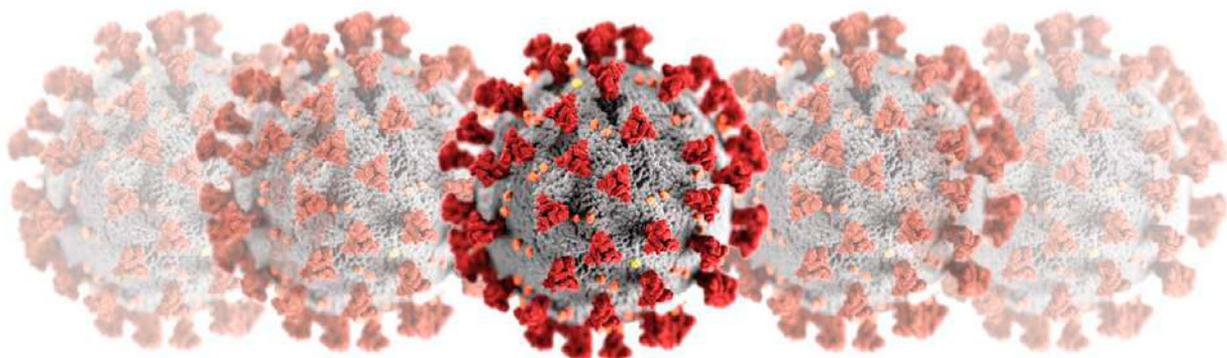


Covid-19

TEST RÁPIDO IgG/IgM

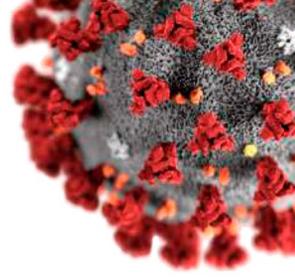


El Test rápido para IgG / IgM de COVID-19 es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de anticuerpos (IgG e IgM) para el nuevo coronavirus humano en sangre entera/suero/plasma humano.

Proporciona ayuda para diagnosticar una infección por nuevo coronavirus.

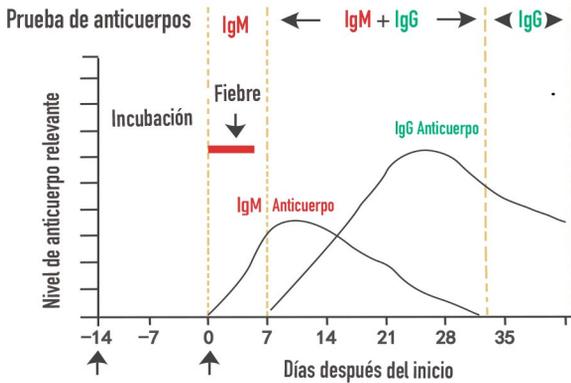

Los anticuerpos serán secretados después de la invasión del virus. La inmunoglobulina M (IgM) viene primero, actuando como el primer signo de infección. La inmunoglobulina G (IgG) llega más tarde, actuando como el primer signo de infección, generando una reacción más específica y más fuerte contra el virus.


Instrucción de operación: Uso correcto, conveniente y rápido

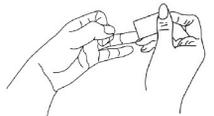

1. Desinfecte la punta del dedo con una almohadilla con alcohol



2. Use una lanceta estéril para extraer sangre de la punta de los dedos

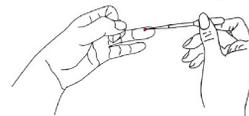

3. Recoge sangre con un gotero



4. Agregue 1 gota de sangre al recipiente de muestra



5. Agregue lentamente 2 gotas de muestra en el recipiente




6. Interprete el resultado en 15 minutos.



7 e 8. Después del uso, los desechos deben tratarse como materiales infecciosos y no deben eliminarse al azar. Recomendamos usar EC STER SPRAY

Interpretación de resultados

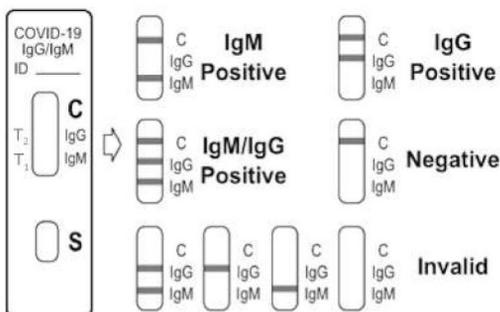

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
COVID-19	Prueba rápida IgG/IgM	Paquete de 25 piezas
5230/26	EC STER SPRAY	10 viales de dosis única
5230/15	EC STER SPRAY	15 viales de dosis única